

Instrukcja instalacji adapterów w Statmatic

Krok 1

Upewnij się, że większa dysza jest z tyłu.




Krok 2

Włóż adapter w obudowę.



Krok 3


Dobrze umieść adapter poprzez pokręcenie obudowy w lewą stronę.

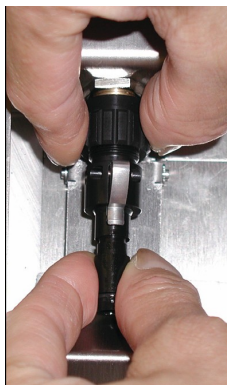

Adaptory do końcówek Sirona – dodatkowe informacje

Krok 1

Najpierw zainstaluj typ adaptera E (Mat.No. S 30101-E)

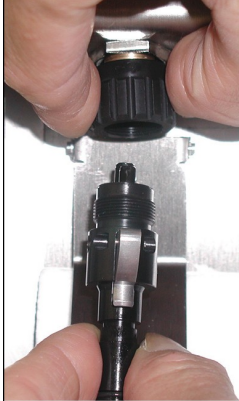

Krok 2

Zainstaluj adapter do końcówek Sirona tak, aby zaskoczył na swoje miejsce.



Adaptory

- Adapter typu E (S30101-E)
- Adapter do główek KaVo (S30101-KVH)
- Adapter do Multiflex/Connex (S30101-CX)
- Adapter do końcówek Sirona T1 (S30101-ST1I)
- Adapter do turbin Sirona T1 (S30101-ST1T)
- Adapter do turbin NSK (S30101-NSK)
- Adapter do turbin A&H (S30101-W&H)
- Adapter do końcówek Midwest (S30101-MW)
- Adapter do turbin BienAIR (S30101-BA)