

## Statim - Konserwacja

<b>codziennie</b>	kasetka	<ul style="list-style-type: none"> <li>może być myta delikatnymi środkami / płynami myjącymi, które nie zawierają chloru</li> </ul>
	pojemnik na wodę	<ul style="list-style-type: none"> <li>zaleca się wymianę wody każdego dnia</li> </ul>
	butelka ma skropliny	<ul style="list-style-type: none"> <li>opróżnia się za każdym razem przed wypełnieniem pojemnika na wodę</li> <li>napełnij butelkę wodą (do znaku MIN), można dodać dezynfektor bez zawartości chloru</li> </ul>
<b>raz w tygodniu</b>	kasetka	<ul style="list-style-type: none"> <li>może być myta delikatnymi środkami / płynami myjącymi, które nie zawierają chloru</li> <li>zastosuj Stat-Dri Plus w celu zapewnienia właściwego suszenia</li> </ul>
	pojemnik na wodę filtr	<ul style="list-style-type: none"> <li>sprawdź filtr wody i myj go, jeśli zachodzi taka potrzeba</li> </ul>
<b>co 6 miesięcy</b>	filtr biologiczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana po 500 cyklach lub po 6 miesiącach</li> </ul>
	uszczelka kasety	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana po 500 cyklach lub po 6 miesiącach lub w razie konieczności</li> </ul>
	kompresor – filtr  (dotyczy Statim 2000S i Statim 5000S wyprodukowanych przed 2005 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana po 500 cyklach lub po 6 miesiącach</li> </ul>